

# TMP Web - Guide d'utilisation rapide

## 1. Accès

### > Par code d'accès

En bas du compte-rendu du radiologue, nous rajoutons une adresse internet et deux codes d'accès. La combinaison de ces codes permet d'accéder aux images anonymisées de l'examen. Celui qui lit le compte rendu, peut voir les images de cet examen. Les autres examens du patient ne sont pas accessibles, préservant ainsi la confidentialité des autres résultats.

Tapez les 2 codes fournis avec le compte-rendu dans les 2 cases ad-hoc et pressez le bouton "Procéder".

The screenshot shows the web portal interface. At the top left is the logo for CHU Dinant Godinne, UCL NAMUR. To the right, it says 'Bienvenue sur le portail IMAGERIE MEDICALE du CHU Dinant Godinne | UCL Namur' and 'Site de Godinne'. Below this is a blue banner with the text 'Visualisez en ligne les images des examens de radiologie et de médecine nucléaire de vos patients'. The main area contains two input fields: 'ID Patient : 0123 Ex.: 106249' and 'N° Examen : 12345 Ex.: 10365426'. A 'Rechercher' button is positioned below the second field. At the bottom of the form area, there is a link: 'Une question ? Cliquez ici pour le [mode d'emploi](#)'. The footer contains copyright information: 'Telemis © 2015 Tous droits réservés. CHU UCL, Mont-Godinne-Dinant Avenue G. Theissen, 1 - B-5530 Yvoir www.chumontgodinne.be support.imagerie-montgodinne@uclouvain.be'.




## 2. Contenu

### Code d'accès

Si vous vous êtes connecté par *Code d'accès*, vous ne verrez que les examens liés à ce code.


### Clichés d'un examen

Une fois le patient et l'examen sélectionnés, la page affiche une vignette par série d'images disponible.

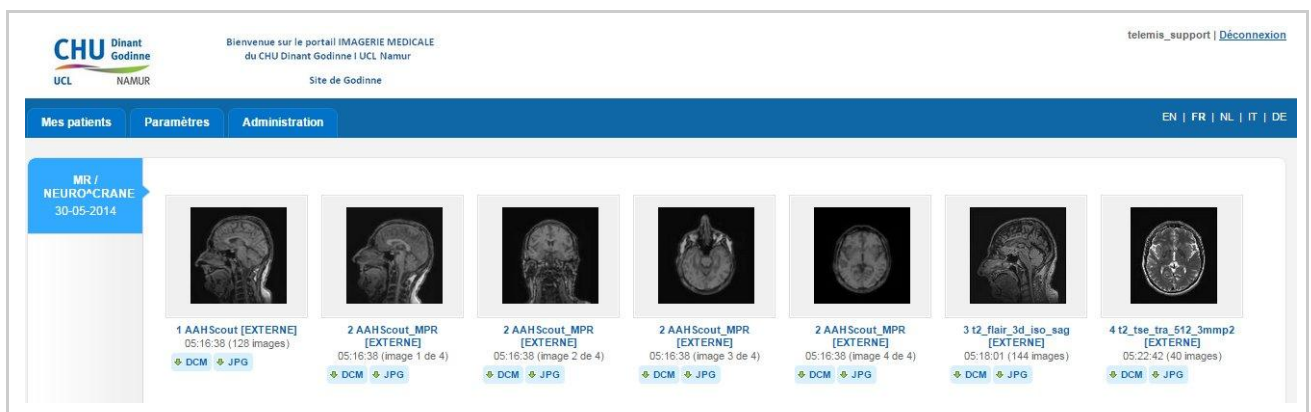

Cliquez sur une des vignettes pour avoir accès aux images de la série.


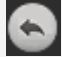


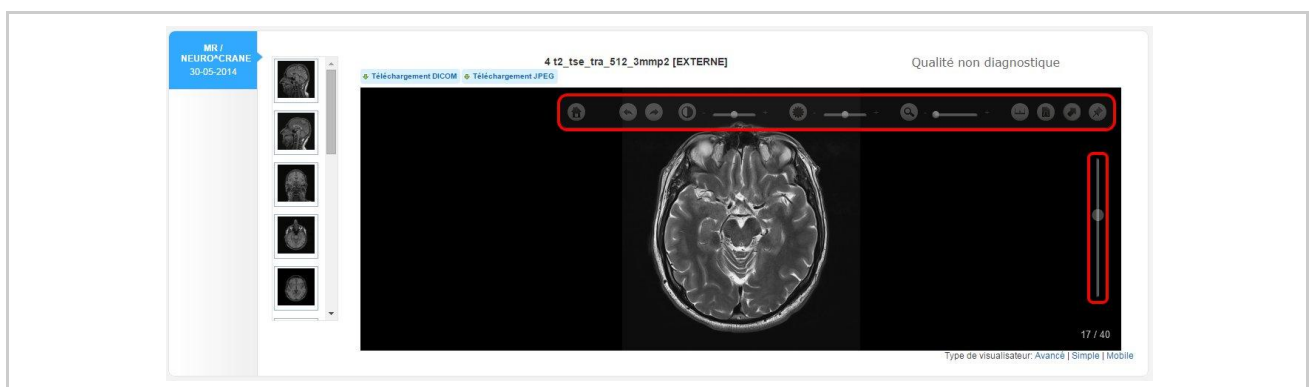





### Visualisation des images sur ordinateur



Cliquez sur l'imagette de la série (situées à gauche de l'image) pour changer de série d'images. Pour défiler les images, faites tourner la roulette de votre souris ou utilisez la réglette (ascenseur) à droite de l'image.


En haut de l'image se trouve la barre de boutons avec les fonctions suivantes:



	Bouton de restauration
	Bouton de rotation sens horlogique
	Bouton de rotation sens anti-horlogique
	Variation de contraste
	Variation de luminosité
	Zoom
	Outil de mesure
	Bouton d'enregistrement de l'image sur le disque dur
	Bouton d'affichage en plein écran ou retour en écran normal
	Bouton pour masquer ou restaurer la barre d'outil

## Visualisation des images sur mobile

Si vous accédez aux images via un mobile (smartphone ou tablette), le visualisateur sera adapté au mobile.

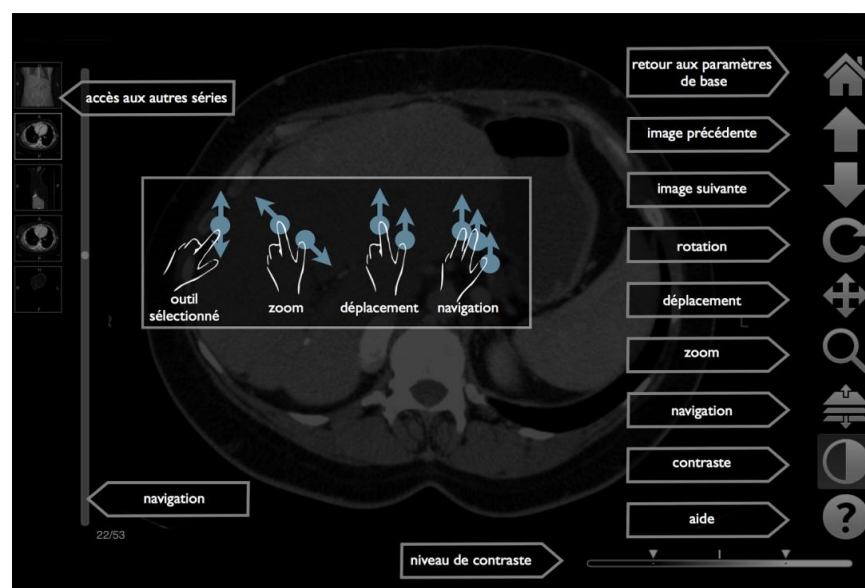

## 3. Téléchargements


Selon la manière dont l'hôpital configure la publication, il est possible de télécharger les images en qualité JPEG non diagnostique, et/ou en qualité DICOM diagnostique.

Votre navigateur Web vous signalera si les documents ne sont plus en ligne. Si le serveur doit republier l'information, il vous invitera à encoder votre adresse email pour vous prévenir quand la publication est terminée (typiquement quelques minutes).


Dans tous les cas, la page se rafraîchira dès que les informations seront disponibles.

### Téléchargement de qualité non diagnostique

Depuis la liste des séries de l'examen, cliquez sur le bouton "JPG" situé sous une série.

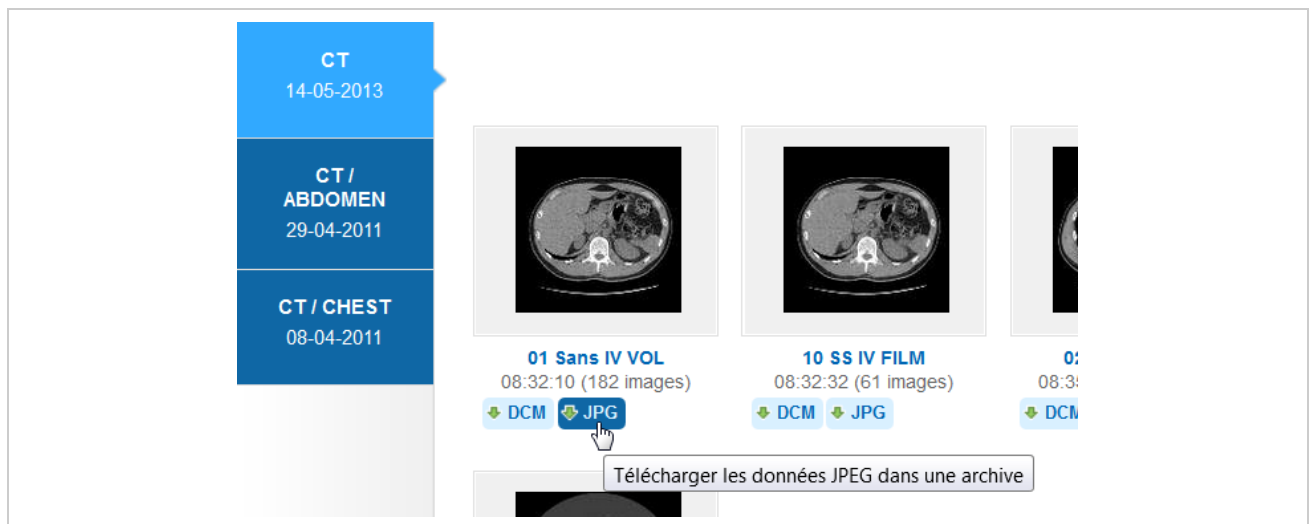

Depuis les images, cliquez sur le bouton "Téléchargement JPEG" situé en haut à gauche des images.

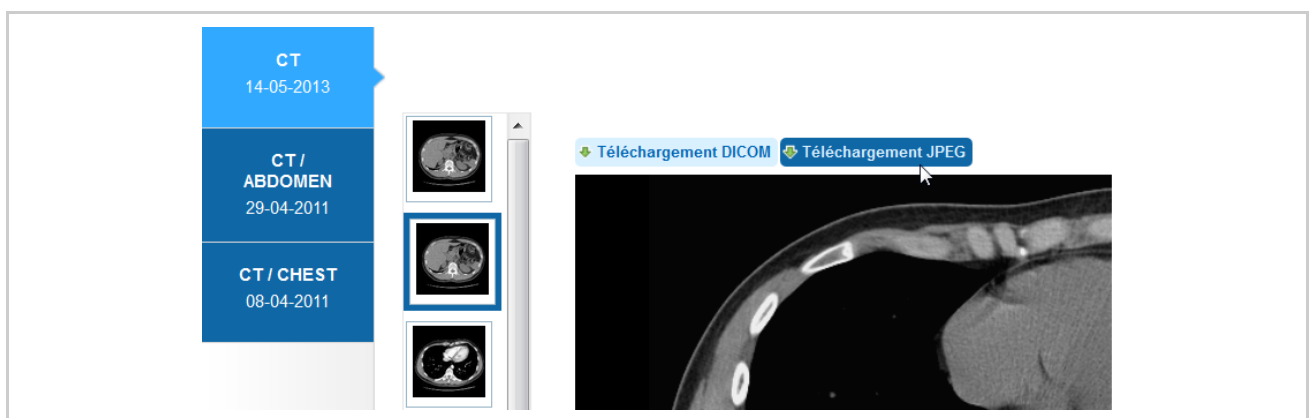

Vous allez ainsi télécharger une archive (fichier 'ZIP') contenant les images de la série sélectionnée.

## Téléchargement de qualité diagnostique

Selon la configuration sélectionnée par l'hôpital, deux possibilités s'offrent à l'utilisateur pour télécharger les images en qualité diagnostique.

### HQ

De manière similaire, depuis la liste des séries de l'examen, cliquez sur le bouton "HQ" situé sous une série ou depuis la vue affichant les images, cliquez sur le bouton "Téléchargement haute qualité".

Les images en qualité DICOM diagnostique seront chargées dans un format comprimé, plus rapide mais nécessitant l'installation d'un programme TMR-GP sur votre machine. Ce logiciel est disponible sur le site [www.telemis.com](http://www.telemis.com), dans la rubrique "produits / téléchargement"

### DICOM

Depuis la liste des séries de l'examen, cliquez sur le bouton "DCM" situé sous une série ou depuis la vue affichant les images, cliquez sur le bouton "Téléchargement DICOM".

Ce option téléchargera un fichier "ZIP" contenant les images DICOM. Un visualisateur DICOM devrait être installé sur votre machine.

